

Prueba rápida de anticuerpos de Ehrlichia canis

■ **USO PREVISTO**

La prueba Canivet E.canis Ab es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de Ehrlichia canis (E.canis Ab) en muestras de suero, plasma y sangre total de perros.

Tiempo de ensayo: 5-10 minutos

■ **PRINCIPIO**

La prueba Canivet E.canis Ab se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral con método sándwich. La tarjeta de prueba tiene una ventana de prueba para observar la ejecución del ensayo y leer los resultados. La ventana de prueba tiene una zona T (prueba) invisible y una zona C (control) antes de ejecutar el ensayo. Cuando la muestra tratada se aplicó en el orificio de muestra del dispositivo, el líquido fluirá lateralmente a través de la superficie de la tira reactiva y reaccionará con los antígenos recombinantes de Ehrlichia prereducidos. Si hay anticuerpos contra Ehrlichia en la muestra, aparecerá una línea T visible. La línea C siempre debe aparecer después de aplicar una muestra, lo que indica un resultado válido. De esta manera, el dispositivo puede indicar con precisión la presencia de anticuerpos contra Ehrlichia en la muestra.

■ **REAGENTS AND MATERIALS**

- 10 bolsas de prueba con tarjetas y desecantes
- 1 botella de tampón de ensayo
- 10 goteros capilares
- 1 inserto

■ **ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD**

El kit se puede almacenar a temperatura ambiente (2-30°C). El kit de prueba es estable hasta la fecha de vencimiento (18 meses) marcada en la etiqueta del paquete. NO CONGELAR. No guarde el kit de prueba bajo la luz solar directa.

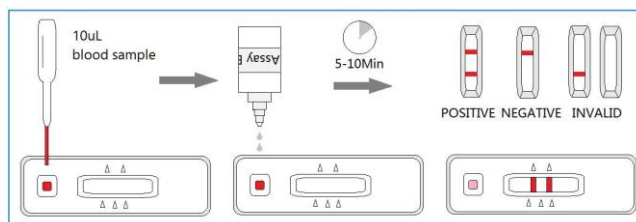
■ **ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD**

1. La muestra debe obtenerse y tratarse como se indica a continuación. Suero o plasma: recolecte la sangre completa del perro paciente, centrifugue para obtener el suero o coloque la sangre completa en un tubo que contenga anticoagulantes para obtener plasma. Sangre entera: uso directo en el ensayo.
2. Todas las muestras deben analizarse inmediatamente. Si no se van a probar ahora, deben almacenarse a 2-8 °C

■ **PROCEDIMIENTO DE PRUEBA**

- Deje que todos los materiales, incluida la muestra y el dispositivo de prueba, se recuperen a 15-25 °C antes de realizar el ensayo

- Saque la tarjeta de prueba de la bolsa de aluminio y colóquela horizontalmente.
- Utilice el gotero capilar para colocar 1 gota (aproximadamente 10 µl) de la muestra preparada en el orificio de muestra "S" de la tarjeta de prueba. Luego, deje caer 3 gotas (aproximadamente 90 µl) del tampón de ensayo en el orificio de la muestra. Inicie el cronómetro. Interprete el resultado en 5-10 minutos.
- El resultado después de 10 minutos se considera no válido.

■ **INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS**

- Positivo (+): La presencia tanto de la línea "C" como de la línea de la zona "T", sin importar que la línea T sea clara o vaga.
- Negativo (-): solo aparece la línea C clara. Sin línea T.
- No válido: no aparece ninguna línea de color en la zona C. No importa si aparece la línea T.

■ **PRECAUCIONES**

- Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de realizar el ensayo.
- No retire el casete de prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de su uso.
- No utilice la prueba más allá de su fecha de vencimiento
- Los componentes de este kit han sido sometidos a pruebas de control de calidad como unidad de lote estándar. No mezcle componentes de diferentes números de lote
- Todos los especímenes son de potencial infección. Debe ser tratado estrictamente de acuerdo con las normas y regulaciones de los estados locales

■ **LIMITACIONES**

La prueba Canivet E.canis Ab está diseñada para uso exclusivo en diagnóstico veterinario in vitro. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible con el veterinario. Se sugiere aplicar otro método de confirmación, como la PCR, cuando se observe un resultado positivo.

Fabricante:

Hangzhou Evegen Biotech Co., LTD
NO.578, 20th Street, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang
310018 China