

■ USO PREVISTO

La prueba combinada Canivet CPV-CCV Ag es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para el diagnóstico diferencial del antígeno del parvovirus canino (CPV Ag) y del antígeno del coronavirus canino (CCV Ag) en muestras de heces o vómito de perros.

Tiempo de ensayo: 5-10 minutos

■ PRINCIPIO

La prueba combinada Canivet CPV-CCV Ag se basa en un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral tipo sándwich. La tarjeta de prueba tiene dos ventanas de prueba para observar la ejecución del ensayo y leer los resultados. La ventana de prueba tiene una zona T (prueba) invisible y una zona C (control) antes de ejecutar el ensayo. Cuando la muestra tratada se aplicó en el orificio de muestra del dispositivo, el líquido fluirá lateralmente a través de la superficie de la tira reactiva y reaccionará con los anticuerpos monoclonales. Si hay antígeno CPV o CCV en la muestra, aparecerá una línea T visible. De esta manera, el dispositivo puede indicar con precisión la presencia del antígeno de Parvovirus o coronavirus en la muestra.

■ MATERIALES Y REACTIVOS

- 10 bolsas de prueba, con tarjetas y goteros desechables
- 10 viales de tampón de ensayo (1000 µl cada uno)
- 10 bolsas de hisopos
- 1 inserto

■ ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD


El kit se puede almacenar a temperatura ambiente (2-30°C). El kit de prueba es estable hasta la fecha de vencimiento (18 meses) marcada en la etiqueta del paquete. NO CONGELAR. No guarde el kit de prueba bajo la luz solar directa.

■ PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

- Recoja el vómito o heces frescas con un hisopo de algodón del ano del perro o del suelo.
- Inserte el hisopo en el tubo de tampón de ensayo proporcionado. Lo agita para conseguir una extracción eficiente de la muestra.
- Saque la tarjeta de prueba de la bolsa de aluminio y colóquela horizontalmente.
- Aspire la extracción de muestra tratada del tubo de tampón de ensayo y coloque 4 gotas en cada orificio de muestra "S" del dispositivo de prueba..

Nota: Si el líquido no fluye a través de la superficie de la tira reactiva en 30 segundos, agregue otra gota de la muestra tratada.

- Interprete el resultado en 5-10 minutos. El resultado después de 10 minutos se considera no válido.

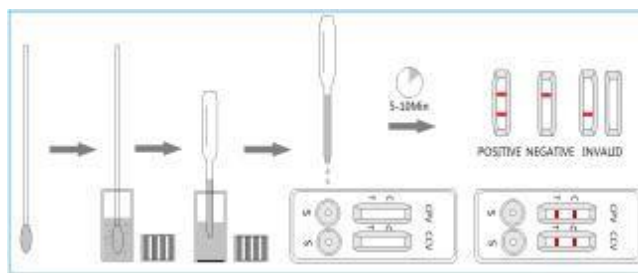

■ INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

- Positivo (+): La presencia tanto de la línea "C" como de la línea de la zona "T", sin importar que la línea T sea clara o vaga.
- Negativo (-): solo aparece la línea C clara. Sin línea T.
- No válido: no aparece ninguna línea de color en la zona C. No importa si aparece la línea T.

■ PRECAUCIONES

- Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente antes de realizar el ensayo.
- No retire el casete de prueba de su bolsa hasta inmediatamente antes de su uso.
- No utilice la prueba más allá de su fecha de vencimiento.
- Los componentes de este kit han sido sometidos a pruebas de control de calidad como unidad de lote estándar. No mezcle componentes de diferentes números de lote.
- Todos los especímenes son de posible infección. Debe ser tratado estrictamente de acuerdo con las normas y regulaciones de los estados locales.

■ LIMITACIONES

La prueba combinada Canivet CPV-CCV Ag está diseñada para uso exclusivo en diagnóstico veterinario in vitro. Todos los resultados deben considerarse con otra información clínica disponible con el veterinario. Se sugiere aplicar otro método de confirmación, como la PCR, cuando se observe un resultado positivo.

Fabricante

Hangzhou Evegen Biotech Co., LTD

NO.578, 20th Street, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang

310018 China