


Prueba rápida COVID-19 & Flu A/B Ag DUO test

Inmunoensayo para la detección cualitativa simultánea de antígenos del SARS-CoV-2, antígenos del virus de la influenza tipo A/B directamente de muestras de hisopados nasofaríngeos

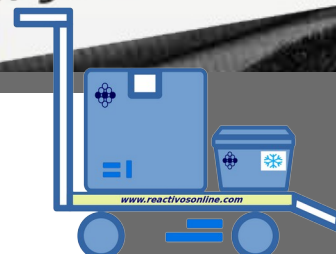


SGTi-flex
COVID-19 &



SGTi-flex

COVID-19 & Flu A/B Ag DUO

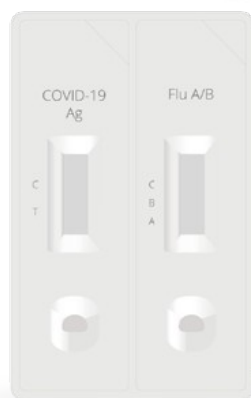

Reactivos Online se complace en ofrecerle las pruebas rápidas para la detección de Antígenos para COVID-19, así como de influenza A&B. Este tipo de pruebas son seguras y fáciles de usar, en poco tiempo proporcionan resultados precisos e información importante, además aumentan la cantidad de pruebas a realizar debido a que no es necesario el uso de equipo adicional.

Oficio: CAS/SESSDM/623/2022

Validado por: **INDRE**
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
Y REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICA


Algunos síntomas del COVID-19 e Influenza son similares, puede ser difícil de diferenciarlos basándose únicamente en los síntomas.

Por lo tanto, el diagnóstico rápido y preciso es esencial para asegurar la efectividad de los tratamientos para el paciente infectado.

- Tiempo para el resultado : 15 minutos
- Muestra : Hisopado nasofaríngeo



MODO DE EMPLEO

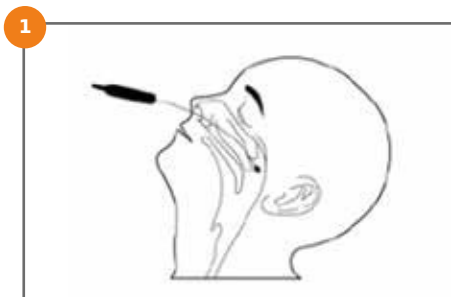


1 Utilice un hisopo de recogida de muestras de un solo uso. El hisopo debe alcanzar una profundidad igual a la distancia desde fosas nasales a la abertura exterior de la oreja.




2 Retire lentamente el hisopo mientras lo gira. Coloque el hisopo de toma de muestra en el Tubo de tampón de extracción que contiene 300 µL de extracción del búfer y gírelo más de 5 veces para permitir la extracción.




3 Saque el hisopo de recolección de muestras presionando y apretando los lados del tubo para extraer el líquido restante del hisopo.

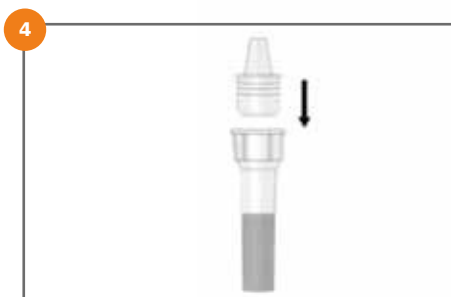

4 Presione la tapa de goteo en el tampón de extracción tubo que contiene la muestra procesada.

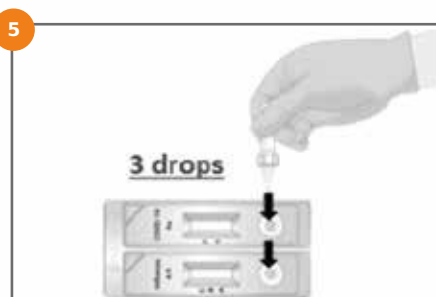

5 Invierta el tubo de tampón de extracción y agregue 3 gotas de muestra procesada en el pocillo de la lectura del resultado después de 30 minutos es inválido.

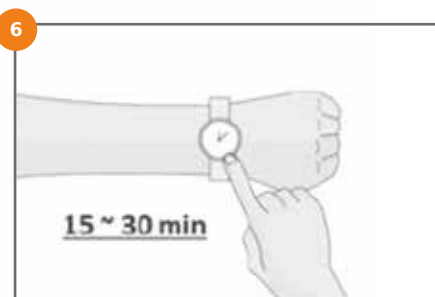

6 Lea los resultados en 15 minutos después de colocar la muestra. La lectura del resultado después de 30 minutos es inválido.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Resultado Positivo



Covid +
Flu A+

Covid +
Flu B+

Covid -
Flu B+

Covid -
Flu A+

Covid +
Flu A/B -

Resultado Negativo



Covid -
Flu A/B -

Resultado Inválido



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

	COVID-19	Influenza A/B
Sensibilidad (Positive percent agreement)	95.07% (95% CI: 90.17%~97.59%)	88.27% (95% CI: 83.03% - 93.51%)
Especificidad (Negative percent agreement)	99.38% (95% CI : 96.55%~99.89%)	100%

La prueba se usa como auxiliar en el diagnóstico rápido y simultáneo de COVID-19 e Influenza A/B.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Presentación	Contenido
CAGD025E	SGTi-flex COVID-19 & Flu A/B Ag Duo	Caja para 25 Pruebas



www.reactivosonline.com



Pino Suarez 3A Puebla, Pue. CP 72595



+52 2213631820



+52 2213631820



www.reactivosonline.com



info@reactivosonline.com



Reon.Line.71271/

